


4-2. Wprowadzanie i obserwacja

Wprowadzanie endoskopu



Ostrzeżenie

NIE wyginać z użyciem siły osłony kompensatora naprężeń w pokazany sposób (Ryc. 4.1). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do uszkodzenia endoskopu.

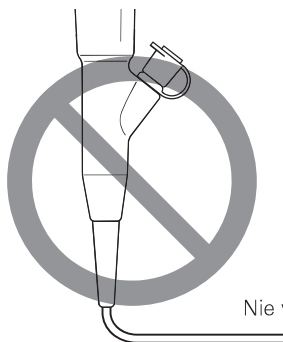


Nie wyginać z użyciem siły

Ryc. 4.1

Powoli i ostrożnie wprowadzić endoskop przez jamę ustną.

Wyregulować jasność do odpowiedniej jasności do obserwacji przy użyciu procesora wizyjnego.

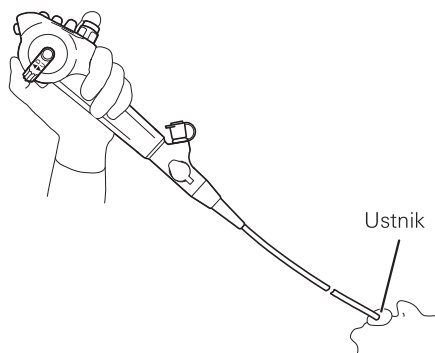

Ryc. 4.2



Uwaga

Nie można uzyskać wyraźnych obrazów, jeśli na soczewce obiektywu lub światłowodzie przyklejony jest obcy materiał. Nieprzerwane używanie światłowodu z przylegającym obcym materiałem może prowadzić do widocznego odparowywania połączonego z odparowywaniem wody z materiału organicznego ogrzewanego przez światło. W przypadku zaobserwowania takich oparów należy niezwłocznie przerwać zabieg i wycofać endoskop z ciała pacjenta. Czystą gazą wyczyścić przywierający obcy materiał i następnie kontynuować zabieg endoskopowy.